

# All-round Joystick Heavy Duty

---

Multifunctionele rolstoeljoystick



All-round Joystick Heavy Duty Omni (P002-73) – R-net (P002-77)  
Of versie voor aansluiting op andere rolstoелеlektronica

## Contact en product

### mo-Vis bvba



Biebuyckstraat 15 D

9850 Nevele - België

Website: [www.mo-vis.com](http://www.mo-vis.com)

E-mail: [contact@mo-vis.com](mailto:contact@mo-vis.com)

Telefoon: +32 9 335 28 60

## Gebruikers- en installatiehandleiding All-round Joystick Heavy Duty

Geproduceerd en gepubliceerd door mo-Vis bvba, België

Versie 1, februari 2016

Catalogusnummer: D-P002-73-75-00

# Inhoud

Contact en product-----	2
mo-Vis bvba-----	2
Gebruikers- en installatiehandleiding All-round Joystick Heavy Duty -----	2
Inhoud-----	3
Belangrijke informatie over deze handleiding-----	5
Ondersteuning, afdanken en reserveonderdelen -----	7
Garantie-----	8
Veiligheidsmaatregelen -----	11
Ontwerp en werking van de All-round Joystick Heavy Duty -----	15
Onderdelen en accessoires -----	17
Configuratiesoftware van mo-Vis -----	20
Beoogd gebruik -----	21
Installatie-instructies -----	23
Vorbereidingen-----	23
Tafelmontage joystick-----	25
Vervangen van de joysticktip-----	25
All-round Joystick Heavy Duty-installatie-----	26
De positie bepalen (instellingen) -----	27
Testen -----	28
Eerste gebruik-----	31
Gebruik van de All-round Joystick Heavy Duty -----	33

Gebruiksvoorwaarden	33
Foutcodes	33
Onderhoud	34
Instellingen	35
Montage-instellingen (gebruikersniveau)	36
Dode zone	36
Compensatie	37
Tilt	39
Compensatiemodus	40
Technische gegevens	41

## Belangrijke informatie over deze handleiding

Hartelijk bedankt dat u voor een product van mo-Vis heeft gekozen! Als u meer informatie over mo-Vis en haar producten wilt, kunt u onze website bezoeken op: [www.mo-vis.com](http://www.mo-vis.com).

Voordat u dit product installeert of gaat gebruiken, is het belangrijk dat u deze installatie- en bedieningsinstructies doorneemt en begrijpt, en dan met name de veiligheidsinstructies.

In de installatie-instructies worden de opties en mogelijkheden beschreven die u als installateur heeft met het mo-Vis-product. De extra handleiding voor de aansluiting maakt integraal deel uit van deze handleiding. Het mo-Vis-product moet ingesteld worden met de configuratiesoftware van mo-Vis.

De bedieningsinstructies zijn met name bedoeld om u vertrouwd te maken met de functies en kenmerken van het mo-Vis-product en hoe u het op de best mogelijke manier kunt gebruiken. Er wordt tevens belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie vermeld en er worden mogelijke problemen in beschreven die tijdens gebruik op kunnen treden.

Bewaar de bedieningsinstructies altijd ergens in of in de buurt van uw rolstoel, aangezien u belangrijke informatie nodig kunt hebben over het gebruik, de veiligheid en het onderhoud.

Alle informatie, afbeeldingen, illustraties en specificaties zijn gebaseerd op de productinformatie die beschikbaar was op het moment van drukken. De in deze instructies weergegeven

afbeeldingen en illustraties zijn representatieve voorbeelden en zijn niet bedoeld als exacte weergaven van de verschillende onderdelen van het product.

We behouden ons het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

### ***Productvermeldingen***

Deze handleiding is van toepassing op de All-round Joystick Heavy Duty.

### ***Documentatie bestellen***

U kunt extra exemplaren van deze gebruikers- en installatiehandleiding downloaden op de website van mo-Vis: [www.mo-vis.com](http://www.mo-vis.com).

# Ondersteuning, afdanken en reserveonderdelen

## *Technische ondersteuning*

Als u technische problemen ondervindt, raden we aan contact op te nemen met uw dealer.

Als de dealer niet beschikbaar is of u niet weet wie de dealer is, kunt u via e-mail contact opnemen met mo-Vis bvba [support@mo-vis.com](mailto:support@mo-vis.com) of bellen naar +32 9 335 28 60.

Vermeld altijd het serienummer van het apparaat als u contact met mo-Vis opneemt. Op deze manier kunnen we u de juiste informatie geven.

## *Reserveonderdelen en accessoires*

Reserveonderdelen en accessoires moeten door de dealer bij mo-Vis bvba worden besteld.

## *Afdanken en recyclen*

Neem de plaatselijke afvalvoorschriften in acht als u het apparaat afdankt.

Gooi overbodige elektronische onderdelen op een verantwoorde wijze weg en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor recycling.

## Garantie

mo-Vis bvba garandeert dat de All-round Joystick Heavy Duty 2 jaar lang vrij is van materiaal- en productiefouten, mits het apparaat op de juiste manier gebruikt, verzorgd en onderhouden wordt. Alle garanties dekken uitsluitend onderdelen en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper van het product bij een mo-Vis-dealer.

### ***Begin van de garantieperiode***

Iedere garantie gaat in op de datum dat het product aan de klant wordt geleverd.

### ***Reparatie en vervanging***

Voor onderhoud tijdens de garantieperiode raden we aan contact op te nemen met de dealer bij wie het product is gekocht. Als er materiaal- of productiefouten optreden, moet de dealer een autorisatienummer voor teruggave (RA) opvragen bij mo-Vis en moet het product naar een door mo-Vis aangewezen servicecentrum worden gestuurd. mo-Vis repareert of vervangt naar eigen goeddunken alle producten die onder de garantie vallen.

### ***Disclaimer en beperking van verhaalsmogelijkheden***

De in deze overeenkomst uiteengezette uitdrukkelijke garanties vervangen alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. mo-Vis is in geen geval aansprakelijk voor directe,



indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van een defect aan dit product. Onderdelen die onderhevig zijn aan "normale slijtage" (zoals pads, joystickballetjes, batterijen enz.) worden niet gedekt door de garantie, met uitzondering van materiaal- of productiefouten.

### ***Wijzigingen***

Niemand heeft het recht de garanties van mo-Vis te wijzigen, verlengen of er afstand van te doen.

### ***Vervallen van garanties***

De eerder genoemde garanties zijn afhankelijk van een correcte installatie, gebruik, onderhoud en zorg voor het product. De garantie vervalt als het product verkeerd is geïnstalleerd of gebruikt, of als het is gerepareerd of er onderdelen zijn vervangen door andere partijen dan mo-Vis of een erkende dealer. Het product en de geïntegreerde kabels zijn onderdelen die niet gerepareerd kunnen worden.

Het toevoegen van apparatuur of uitrusting die niet is gefabriceerd of aanbevolen door mo-Vis, kan van invloed zijn op de beoogde werking van het mo-Vis-product en kan de garantie ongeldig maken.

### ***Gebruik begrijpen***

De zorgverlener (geautoriseerde installateur) is er verantwoordelijk voor dat hij/zij het beoogd gebruik van de mo-Vis-apparatuur, de

specificaties en de programmeerinstellingen begrijpt. mo-Vis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuiste installatie of onjuist gebruik van het product. Verkeerd gebruik, een verkeerde behandeling en opslag worden niet gedekt door deze garantie.

# Veiligheidsmaatregelen

## *Algemeen*

De All-round Joystick Heavy Duty kan op iedere elektrische rolstoel met een Omni- (P002-73) of R-net- (P002-77) aansluiting worden gemonteerd. Andere versies voor andere rolstoelaansluitingen zijn beschikbaar. Raadpleeg de Handleiding voor de aansluiting of contacteer uw dealer of mo-Vis voor meer informatie.

Onjuist gebruik of een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken bij de gebruiker en tot schade aan de rolstoel of andere eigendommen leiden. Neem deze instructiehandleiding zorgvuldig door om deze risico's te beperken en besteed speciale aandacht aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

Ongeautoriseerd gebruik van het product kan een grotere kans op ongelukken tot gevolg hebben. Volg de aanbevelingen in deze handleiding nauwgezet op om ongelukken door gebruik te voorkomen.

De All-round Joystick Heavy Duty en de geïntegreerde kabels zijn onderdelen die niet gerepareerd kunnen worden.

Neem als u twijfelt over bepaalde wijzigingen en aanpassingen altijd contact op met een gecertificeerde servicemonteur.

## Waarschuwinglabels

Deze handleiding bevat de volgende waarschuwinglabels, die bedoeld zijn om u te wijzen op situaties die tot ongewenste problemen kunnen leiden, zoals persoonlijk letsel of schade aan de rolstoel.



### **LET OP!**

*Wees voorzichtig als u dit symbool ziet.*



### **WAARSCHUWING!**

*Wees uiterst voorzichtig als u dit symbool ziet. Het niet in acht nemen van waarschuwingen kan tot persoonlijk letsel of eigendomsschade leiden.*



### **LET OP!**

#### **Beperkte garantie**

*mo-Vis accepteert geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of eigendomsschade als gevolg van het niet opvolgen door de gebruiker of andere personen van de aanbevelingen, waarschuwingen en instructies in deze handleiding.*



### **LET OP!**

#### **EMC-vereisten**

*De elektronica en accessoires van een elektrische rolstoel kunnen verstoord worden door externe elektromagnetische velden (bijvoorbeeld van mobiele telefoons). De elektronica en accessoires van een rolstoel kunnen ook zelf elektromagnetische velden uitstralen die de directe omgeving kunnen verstoren (bijvoorbeeld bepaalde alarmsystemen in bedrijven).*

*De grenswaarden voor elektronische compatibiliteit (EMC) met betrekking tot elektrische rolstoelen staan vermeld in de geharmoniseerde EU-normen in de richtlijn voor medische apparatuur, nr. 93/42/EEC.*

*De All-round Joystick Heavy Duty voldoet aan deze grenswaarden.*



### **WAARSCHUWING!**

#### **Installatie**

*De All-round Joystick Heavy Duty mag uitsluitend geïnstalleerd of aangepast worden door een gecertificeerde servicemonteur of iemand met voldoende kennis om de aanpassing correct uit te kunnen voeren.*

#### **Onderhoud en service**

*Voer alleen de in de handleiding gespecificeerde service en onderhoud uit, zolang er aan de in deze handleiding beschreven vereisten voor een bepaalde handeling wordt voldaan. Alle overige service, wijzigingen en aanpassingen aan het product moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerde servicemonteur, die over voldoende kennis beschikt om de aanpassing correct uit te kunnen voeren. Neem als u twijfelt contact op met een gecertificeerde servicemonteur of mo-Vis. Gebruik uitsluitend door mo-Vis goedgekeurde of aanbevolen reserveonderdelen of accessoires. Gebruik van andere reserveonderdelen of accessoires kan de werking en veiligheid van het product in gevaar brengen. Hierdoor kan ook de garantie komen te vervallen.*



### **LET OP!**

#### **Testen**

*De All-round Joystick Heavy Duty moet altijd getest worden zonder dat er iemand in de rolstoel zit na iedere wijziging van de fysieke installatie of aanpassing van de joystickinstellingen.*

# Ontwerp en werking van de All-round Joystick Heavy Duty

## *Doel*

De All-round Joystick Heavy Duty is een grote, extreem duurzame proportionele joystick voor allround zwaar gebruik. Het kan dienen als een hand- of voetbediende joystick en werd ontwikkeld voor gebruikers met overmatige kracht (spasticiteit, dystonie, ...)

De All-round Joystick Heavy Duty bevindt zich bovenaan in ons gamma joysticks:

- **All-round Joystick Heavy Duty:** grote joystick, extreme kracht (ca. 650 gram)
- **All-round Joystick:** joystick met een standaard grootte, standaard kracht (ca. 250 gram - 8,81 oz)
- **All-round Joystick Light:** joystick met een standaard grootte, gemiddelde kracht (ca. 120 gram - 4,23 oz)
- **Multi Joystick:** kleinere joystick, beperkte kracht (ca. 50 gram - 1,76 oz), te bedienen met vingers, kin, lip enz.
- **Micro Joystick:** zeer kleine joystick, beperkte kracht (ca. 10 gram - 0,3 oz), te bedienen met vingers, kin, tong, lip enz.

## *Eigenschappen*

De All-round Joystick Heavy Duty is:

- Volledig proportioneel, met grotere amplitude en kracht (ca. 650 gram – 22,93 oz)
- Ingebouwd in een compacte behuizing, met twee aansluitingen van 3,5 mm om van input te kunnen wisselen.
- Koppelbaar met één of twee schakelaars (aan/uit = rode aansluiting en mode = gele aansluiting), met iedere aansluiting van 3,5 mm.
- Geïntegreerde interface. Verschillende aansluitingstypes beschikbaar, afhankelijk van de versie.
- Uitgerust met mini-USB-aansluiting om de joystick te configureren.
- Volledig aanpasbaar aan persoonlijke wensen en behoeften met slimme elektronica.
- Eenvoudig te configureren met de gratis configuratiesoftware van mo-Vis: plaatsen van de joystick. Voor overige instellingen heeft u de software-instellingen van de rolstoel nodig.
- Compatibel met meerdere types rolstoelelektronica. Raadpleeg de handleiding voor de aansluiting voor meer informatie.



## Montage


De All-round Joystick Heavy Duty kan overal op de rolstoel worden gemonteerd.

- Met de standaard dubbele M6\*12-aansluitbouten.
- Op een vlak oppervlak: met de optionele bevestigingsring voor zware belastingen (M002-28)
- U kunt ook alle overige montagesystemen gebruiken.

## Onderdelen en accessoires

### All-round Joystick Heavy Duty pakket


Een All-round Joystick Heavy Duty-pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

	Productbeschrijving	Productcode
	All-round Joystick Heavy Duty-set, met geïntegreerde kabels en in 2 M6*12-bouten	P002-73 (Omni) P002-77 (R-net) Of versie voor andere aansluiting
	Handleiding All-round Joystick Heavy Duty	D-P002-73-70 D-P002-77-70

	Productbeschrijving	Productcode
	Handleiding voor de aansluiting	D-P002-81-70 (Omni) D-P002-85-70 (R-net) Of versie voor andere aansluiting

### **All-round Joystick Heavy Duty accessoires**

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

	Productbeschrijving	Productcode
	Heavy Duty bevestigingsring voor montage van de joystick op een vlak oppervlak	M002-28

### **Gegevens All-round Joystick Heavy Duty**

De aansluitingen van de Joystick hebben beschermcovers om te voorkomen dat er tijdens gebruik stof of vocht binnenkomt.



**LET OP!**

*Verwijder de beschermcover voordat u iets aansluit.*



### **LET OP!**

*Bewaar de beschermcover altijd voor als de aansluitingen niet worden gebruikt.*



Als de All-round Joystick Heavy Duty in gebruik is, dan geeft een groen led-lichtje aan dat de joystick correct functioneert. Bij een storing zal het led-lichtje knipperen. Raadpleeg de Handleiding voor de aansluiting voor meer informatie.

### **Reserveonderdelen bestellen**

Reserveonderdelen en accessoires moeten door de dealer bij mo-Vis bvba worden besteld.

Vermeld altijd de productcode en productbeschrijving van de te bestellen artikelen.

De positie van de All-round Joystick Heavy Duty is aanpasbaar met de configuratiesoftware van mo-Vis.

### ***Software downloaden***

- U kunt de software downloaden op de website van mo-Vis: [www.mo-vis.com](http://www.mo-vis.com).
- Voor alle informatie over de installatie en het gebruik van de software, kunt u de handleiding van de configuratiesoftware van mo-Vis raadplegen (beschikbaar op de ondersteunings-/downloadpagina van de mo-Vis-website).

### ***Profielen***

Afhankelijk van uw profiel (gebruiker, begeleider, dealer, OEM) kunt u een aantal instellingen configureren voor de All-round Joystick Heavy Duty.

- Voor een gebruikersprofiel is geen wachtwoord nodig.
- Voor begeleider-, dealer- en OEM-profielen is wel een wachtwoord nodig.

De All-round Joystick Heavy Duty is een joystick die rechtstreeks op de elektronica van de rolstoel kan worden aangesloten om de rolstoelfuncties te bedienen.

### Veiligheidsmaatregelen



#### **LET OP!**

*Bescherm de joystick tegen stoten.*



#### **WAARSCHUWING!**

*Probeer tijdens het rijden niet tegen obstakels aan te rijden.*



#### **WAARSCHUWING!**

*Probeer het toestel en de bedrading niet te beschadigen. Zorg ervoor dat de kabels dusdanig zijn gemonteerd zodat deze niet overmatig kunnen slijten.*

### Werking

De bewegingen van de joystick worden overgezet naar vergelijkbare bewegingen van de rolstoel, oftewel rijden of menunavigatie.

U kunt de All-round Joystick Heavy Duty het beste op de volgende manier gebruiken om met de rolstoel te rijden:

- **Richting:** richt de joystick in de richting waar u met uw rolstoel naartoe wilt. De rolstoel gaat vervolgens die kant uit.

- **Snelheid:** hoe verder u de joystick van de standaard (middelste) positie beweegt, des te sneller de rolstoel rijdt.
- **Stoppen:** als u de joystick loslaat, keert deze terug naar de standaard (middelste) positie en stopt de rolstoel.

## Veilig rijden

Het is verplicht om tijdens het rijden binnen handbereik van de gebruiker een aan/uit-toets op uw rolstoel te hebben, die onmiddellijk de aandrijving en elektronica van de rolstoel uitschakelt. Hiermee kan de rolstoel onmiddellijk worden gestopt bij problemen of in geval van nood.



### **WAARSCHUWING!**

*De gebruiker moet te allen tijde bij de aan/uit-toets kunnen.*

Als de rolstoel op een onverwachte manier reageert, moet de gebruiker de joystick onmiddellijk loslaten of de aan/uit-toets gebruiken.

## Aansluitopties

U kunt één of twee schakelaars aansluiten op de All-round Joystick Heavy Duty. De ene aansluiting is om de stroom (pwr) in en uit te schakelen en de andere om de modus (in) in te stellen.

De aansluitingsinterface hangt af van de joystickversie. Gelieve de handleiding voor de aansluiting te raadplegen voor meer informatie over de connectiviteit.

# Installatie-instructies

## Vorbereidingen

### ***Gecertificeerde servicemonteur***

De joystick mag alleen door een gecertificeerde servicemonteur geïnstalleerd worden.



#### ***WAARSCHUWING!***

*Het onjuist programmeren van de elektronica van de rolstoel kan de apparaten beschadigen of de gebruiker verwonden.*

### ***Gereedschap***

Gebruik een inbussleutel om de joystick te monteren.



#### ***LET OP!***

*Gebruik het juiste gereedschap om de joystick te installeren en af te stellen. Gebruik van onjuist gereedschap kan het apparaat beschadigen.*



#### ***LET OP!***

*Draai schroeven niet te strak aan.*

## **Installatieplan**

Stel vóór installatie een installatieplan op. Op basis van de behoeften van de gebruiker en de mogelijkheden van de rolstoel van de gebruiker, moet er in dit plan rekening worden gehouden met:

- Waar de Joystick geplaatst moet worden.
- Waarmee de Joystick bediend gaat worden: hand, voet, ...
- Een stevige en solide plaatsing. Ruige of plotselinge bewegingen van de rolstoel mogen geen invloed hebben op de installatie.



### **LET OP!**

*Bescherm de joystick tegen stoten*



### **WAARSCHUWING!**

*Probeer het toestel en de bedrading niet te beschadigen. Zorg ervoor dat de kabels dusdanig zijn gemonteerd zodat deze niet overmatig kunnen slijten.*



### **LET OP!**

*Alle aansluitingen moeten altijd met alle geleverde schroeven worden vastgedraaid. Gebruik uitsluitend de met de verpakking meegeleverde schroeven.*



### **WAARSCHUWING!**

*Gebruik de schroefgaten onderaan het toestel niet om het toestel te monteren of vast te zetten. Die zijn niet bedoeld voor zwaar gebruik en zijn dus bedekt.*



## Sticker met het serienummer

De met het pakket meegeleverde sticker met het serienummer moet achter op deze handleiding worden geplakt.

## Tafelmontage joystick

Wanneer de All-round Joystick Heavy Duty op een vlak oppervlak (bv. een tablet of tafelblad) gemonteerd wordt, gebruik dan de Heavy Duty bevestigingsring voor zware belasting (Productcode: M002-28) om de joystick direct aan het oppervlak vast te maken.



### **LET OP!**

*Draai de bouten stevig, maar niet te strak aan. Te veel kracht kan de joystick beschadigen.*

## Vervangen van de joysticktip

Indien nodig kan de joysticktip vervangen worden door een aangepaste tip (bv. een 'T').

- Om de standaard joysticktip te verwijderen moet u de rubberen huls onder de joystick van beneden naar boven openen en een M12x1,5-sleutel gebruiken om de tip los te schroeven.
- Indien u de joysticktip vervangt, dan is dat op eigen risico.

- Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of mo-Vis. Er kunnen aangepaste tips verkrijgbaar zijn.

## All-round Joystick Heavy Duty installatie

1. Monteer de joystick met de twee meegeleverde M6\*12-bouten op de gewenste plaats.
  - Monteer de joystick niet met de schroefgaten onderaan de joystick.
  - Als u de bevestigingsring gebruikt om de joystick op een vlak oppervlak te installeren: bevestig eerst de bevestigingsring op de joystick met behulp van de bij de ring meegeleverde bouten en maak de ring dan vast aan het vlak oppervlak. De bevestigingsring moet altijd op de onderzijde van het vlak oppervlak geplaatst worden.
  - Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of mo-Vis.
2. Bevestig alle kabels op de rolstoel en zet alles goed vast.



### **WAARSCHUWING!**

*Probeer het toestel en de bedrading niet te beschadigen. Zorg ervoor dat de kabels dusdanig zijn gemonteerd zodat deze niet overmatig kunnen slijten.*

3. Plaats indien nodig een aan/uit-schakelaar (pwr) en/of modusschakelaar (in), zet de kabels vast en sluit de aansluitingen aan.



**LET OP!**

*Verwijder de beschermcover voordat u iets aansluit.*



**LET OP!**

*Bewaar de beschermcover altijd voor als de aansluitingen niet worden gebruikt.*

4. Sluit de kabels aan op de elektronica van de rolstoel



**WAARSCHUWING!**

*Alle elektronica van de rolstoel moet worden uitgeschakeld tijdens de installatie.*

## De positie bepalen (instellingen)

Als de All-round Joystick Heavy Duty niet met de USB-aansluitingen naar de gebruiker toe wordt gemonteerd, kunt u de richting van de joystick aanpassen in stappen van 90° met behulp van de configuratiesoftware van mo-Vis.

- Deze software moet op een pc worden geïnstalleerd en klaar zijn voor gebruik.
- Afhankelijk van uw profiel (gebruiker, begeleider, dealer, OEM) kunt u een aantal instellingen wijzigen.

- Om de bewegingen tijdens de installatieprocedure in te stellen, raden we minstens een dealerprofiel aan.

### ***Instellingen definiëren***

Ga als volgt te werk om de instellingen te definiëren:

1. Sluit de All-round Joystick Heavy Duty aan op een pc. Gebruik een standaard mini-USB of USB-kabel.
2. Configureer de instellingen met de software.
3. Upload de configuratie.
4. Test de configuratie en pas deze indien nodig aan.

### ***Instellingen***

Ga naar "Instellingen" voor een lijst met alle instellingen.

## Testen

Voer na installatie van de All-round Joystick Heavy Duty de volgende tests in onderstaande volgorde uit voordat de rolstoel aan de gebruiker geleverd wordt of gebruikt wordt:

1. Controleer of de joystick intact is
2. Operationele test
3. Testrit
4. Remtest

## Controleer of de joystick intact is

Controleer of:

- De joystick niet krom of beschadigd is.
- Behuizing, kabels en alle aansluitingen niet beschadigd zijn.
- De joystick keert terug in de standaardpositie als de joystick naar voren, achteren, links en rechts wordt bewogen of vanuit deze posities wordt losgelaten.

## Operationele test



### **WAARSCHUWING!**

*Voer deze test uitsluitend uit op een vlakke ondergrond, met ten minste één meter vrije ruimte rondom om de rolstoel.*

1. Schakel het besturingssysteem van de rolstoel in.
2. Het groene led-lichtje op de joystick moet branden. Als het led-lichtje knippert, dan is er een fout vastgesteld. Ga niet door vooraleer u de fout opgelost hebt.
3. Beweeg de joystick langzaam naar voren totdat u hoort dat de parkeerremmen uitgeschakeld worden.



### **LET OP!**

*De rolstoel kan gaan rijden.*

4. Laat de joystick onmiddellijk los. Als het goed is, hoort u de parkeerrem binnen een paar seconden reageren.

5. Herhaal stap 3 en 4 drie keer, terwijl u de joystick langzaam van links naar rechts naar u toehaalt.
6. Controleer of de aan/uit-schakelaar en mode-toets correct werken.

### ***Testrit***

Maak een testrit met de rolstoel.

- Controleer of de rolstoel en alle functies correct werken in alle posities waarin de gebruiker de joystick en schakelaars wil gaan gebruiken.
- Controleer of er geen kabels of onderdelen beschadigd kunnen raken of klem kunnen komen te zitten in alle mogelijke posities van de rolstoel.

### ***Remtest***

Rijd met volle snelheid vooruit en schakel de rolstoel uit met de aan/uit-toets.

De rolstoel mag niet abrupt stoppen, maar moet langzaam vaart verminderen en stoppen.

### *Ondersteuning van de dealer*

Als de gebruiker de joystick voor het eerst gaat gebruiken, is het handig hulp aan de dealer of servicemonteur te vragen om de verschillende mogelijkheden aan de klant (de gebruiker en/of zijn/haar begeleider) uit te leggen.

indien nodig, dan kan de dealer de laatste aanpassingen doen.

### *Gebruikerstest*

Het is belangrijk dat de klant weet hoe de joystick werkt, hoe hij/zij deze moet gebruiken en wat er aangepast kan worden om de gebruikerservaring te verbeteren.

Doe als dealer het volgende:

1. Vertel de klant en laat hem/haar zien hoe u de joystick heeft geïnstalleerd en leg uit hoe iedere (nieuwe) knop werkt.
2. Laat de gebruiker alle posities van de joystick testen:
  - Zijn de joystick en schakelaars binnen handbereik?
  - Kan de gebruiker de rolstoel veilig en moeiteloos bedienen?
  - Zijn de joystick en knoppen in alle beschikbare posities optimaal geplaatst voor de gebruiker?
3. Pas de joystick indien nodig aan.

4. Vertel de klant over mogelijke problemen en hoe ze kunnen worden opgelost.



# Gebruik van de All-round Joystick Heavy Duty

## Gebruiksvoorwaarden

De All-round Joystick Heavy Duty moet zoals geïnstalleerd door de dealer worden gebruikt, in overeenstemming met de installatie-instructies in deze handleiding.

De voorziene gebruiksvoorwaarden worden tijdens het eerste gebruik door de dealer of servicemonteur aan de gebruiker en/of begeleider uitgelegd.

Als de gebruiksvoorwaarden ingrijpend veranderen, neemt u contact op met uw dealer of een gecertificeerde servicemonteur om overmatige slijtage of onbedoelde schade te voorkomen.

## Foutcodes

Bij een fout zal het led-lichtje van de All-round Joystick Heavy Duty beginnen knipperen. Na een lange interval zal het led-lichtje met een korte interval knipperen.

De foutmelding hangt af van het type aansluiting. Tel het aantal keer dat het led-lichtje knippert en zoek de bijbehorende foutmelding op in de handleiding voor de aansluiting.

# Onderhoud

## *Reinigen*

Reinig alle onderdelen van de All-round Joystick Heavy Duty regelmatig (maandelijks), of als u dat nodig acht.

- Verwijder stof en vuil voorzichtig met een vochtige doek.
- Gebruik uitsluitend niet-agressieve desinfecterende schoonmaakmiddelen.



### ***WAARSCHUWING!***

*Niet onderdempelen in water of enorme hoeveelheden vloeistof gebruiken.*



### ***LET OP!***

*Smeer geen extra smeermiddelen op de bewegende delen.*

## *Maandelijkse controle*

Controleer maandelijks, of als u dit nodig acht, of:

- Alle bouten en schroeven nog stevig aangedraaid zijn.
- De bedrading niet beschadigd is.
- Onderdelen niet overmatig versleten zijn.

## *Jaarlijkse controle*

We raden aan de rolstoel en besturingssystemen minstens ieder jaar volledig te laten controleren door een gecertificeerde servicemonteur.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke dealer of mo-Vis.

## *Onderhoudsvrij*

De All-round Joystick Heavy Duty is onderhoudsvrij. Bij normaal gebruik hebben de joystick, met geïntegreerde interface en verschillende onderdelen geen extra onderhoud nodig.

## Instellingen

U kunt de instellingen van de All-round Joystick Heavy Duty aanpassen met de configuratiesoftware van mo-Vis. Afhankelijk van uw profiel (gebruiker, begeleider, dealer, OEM) kunt u een aantal instellingen wijzigen.

## Montage-instellingen (gebruikersniveau)

Instelling	Beschrijving	Parameters	
Montage-richting	Montagerichting van de joystick	Standaard	0°
		Min.	0°
		Max.	270°
		Stappen	90°

## Dode zone

Instelling	Beschrijving	Parameters	
Dode zone	Neutrale zone rond de middelste positie van de joystick. Voorkomt dat de rolstoel zich verplaatst als u de joystick loslaat.	Standaard	5%
		Min.	5%
		Max.	10%

**Opmerking:** de meeste rolstoeelektronica hebben een eigen dode zone. Het is aanbevolen om de standaardinstelling te behouden.

## Compensatie

Instelling	Beschrijving	Parameters	
<p>Compensatiefactor</p>	<p>Verlaagt de voorwaartse/achterwaartse (Y) rijsnelheid op een ruwe ondergrond.</p> <p>Het type rolstoel en het gewicht ervan beïnvloeden deze factor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bij zwaarbelaste rolstoelen moet hun standaardinstelling verlaagd worden naar Weak (zwak).</li> <li>– Bij lichte rolstoelen moet deze standaardinstelling verlaagd worden naar Strong (sterk).</li> <li>– Als de joystick gemonteerd wordt op een plaats die de schokwaarde (bv. op een arm) kan vergroten, dan moet de standaardinstelling verlaagd worden naar Weak (zwak) of Very weak (zeer zwak).</li> </ul>	Very weak (zeer zwak)	bijna geen vertraging
		Weak (zwak)	vertraagt minder in vergelijking met Normal (normaal)
		Normal (normaal)	<b>Standaardinstelling</b>
		Strong (sterk)	vertraagt meer in vergelijking met Normal (normaal)
		Very strong (zeer sterk)	vertraagt meer in vergelijking met Strong (sterk)

Instelling	Beschrijving	Parameters	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rolstoelen met voorwielaandrijving worden minder beïnvloed door deze factor dan rolstoelen met achterwielaandrijving.</li> </ul>		
X compensatie	<p>Om de stuurreactie in te perken als de rolstoel overmatig reageert op stuurcommando's. Dat kan gebeuren omwille van compensatie op de X-richting die de rolstoel ervan belet om een obstakel te overwinnen door het wrijvingsverlies.</p> <p>De waarde is gebaseerd op de compensatie in de Y-richting.</p>	None (geen)	<b>Geen compensatie</b>
		1/2 Y	X = 50% van het Y-niveau
		2/3 Y	X = 66% van het Y-niveau
(de)activatiepatroon	<p>Actief als de compensatiemodus op Handmatig ingesteld is.</p> <p>Om te activeren / deactiveren: duw de joystick voorwaarts + achterwaarts + voorwaarts.</p>	Fast (snel)	snelle uitvoersnelheid
		Normal (normaal)	<b>normale uitvoersnelheid</b>

Instelling	Beschrijving	Parameters	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Behendige gebruikers kunnen in staat zijn om dat patroon redelijk snel uit te voeren.</li> <li>– Stel de parameter in naargelang de behendigheid van de gebruiker.</li> <li>– <b>Let op:</b> "Traag" kan ervoor zorgen dat de rolstoel gaat rijden tijdens het uitvoeren van dit patroon.</li> </ul>	Slow (traag)	trage uitvoersnelheid

## Tilt

Instelling	Beschrijving	Parameters	
Activeren	<p>De joystick kan de tilt van de joystick ten opzichte van de zwaartekracht van de aarde detecteren.</p> <p>De rolstoel zal stoppen met rijden als deze parameter geactiveerd is, en de joystick zal meer gekanteld zijn dan de hoek zoals vastgelegd in de hoekinstelling.</p> <p><b>Belangrijk:</b> de joystick moet langer dan 5 s gekanteld worden.</p>		
Hoek	De hoek waarmee de tilt van de joystick vergeleken wordt.	Standaard	<b>40°</b>
		Min.	5°

Instelling	Beschrijving	Parameters	
	Als de tilt van de joystick (ten opzichte van de zwaartekracht van de aarde) groter is dan de hoek die in deze parameter vastgelegd wordt, dan zal de rolstoel na ca. 5 s stoppen.	Max.	40°

## Compensatiemodus

Instelling	Beschrijving	Parameters	
Compensatiemodus	zorgt voor de activering van het compensatiealgoritme.  Voor R-net: kan voor elke profiel afzonderlijk ingesteld worden.	Off (uit)	altijd gedeactiveerd
		Manual (handmatig)	handmatig ge(de)activeerd door de gebruiker
		On (aan)	altijd geactiveerd



# Technische gegevens

## *Productbeschrijving en productcode*

- All-round Joystick Omni Heavy Duty (P002-73)
- All-round Joystick R-net Heavy Duty (P002-77)
- Of versie voor aansluiting op andere rolstoelelektronica

## *Joystickaansluitingen*

- 3,5-mm-mono-aansluiting (in) aan/uit
- 3,5-mm-mono-aansluiting (in) modus
- Mini-USB
- Rolstoelaansluiting afhankelijk van de joystickversie  
Raadpleeg de handleiding voor de aansluiting voor meer informatie.

## *Afmetingen*

- 175 x 86 x 86 mm / 6,89 x 3,38 x 3,38 in (HxBxD)

## *Vereiste kracht*

- ca. 650 gram (22,93 oz)

Installatiedatum: . . / . . / . . . .



Dealer: . . . . .

***Stempel dealer:***

A large, empty rectangular box with a thin green border, intended for a dealer stamp.

***Sticker met het serienummer***

A large, empty rectangular box with a thin green border, intended for a serial number sticker.